

Instrukcja obsługi dla Derma LiteCheck® Stan na 02/12

Derma LiteCheck® ma zastosowanie w indywidualnych instruktażach, krótkich szkoleniach w zakresie higieny rąk i treningów ochrony skóry za pomocą fluorescencyjnej metody Dermalux®

Ogólne bezpieczeństwo

- Przed uruchomieniem urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Instrukcję należy zachować na przyszłość,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania tylko jako element działań szkoleniowych,
- Gdy urządzenie nie jest używane - zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W przypadku wystąpienia problemów ze świetlówką, wyłączyć urządzenie, wyciągnąć ją w celu oczyszczenia lub wymiany. Wyłączając z gniazdka, ciągnąc za wtyczkę - nie za przewód!
- Urządzenie należy włączać i używać jedynie w stanie otwartym,
- Nigdy nie włączać urządzenia bez lampy fluorescencyjnej!
- Każdorazowo, przed użyciem urządzenia, sprawdzić stan techniczny urządzenia i kabla. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, urządzenia nie używać!
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz skontaktować się z naszym serwisem,
- Urządzenie przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie winno być obsługiwane za pomocą dostarczonego kabla zasilania sieciowego (230 V).
- Używać żarówek wyłącznie typu LL8W/BLB.
- Uwaga: Nie wolno włączać urządzenia bez lamp!
- Po zakończeniu szkolenia i gdy urządzenia nie obserwujemy wyłączyć je, każdorazowo wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Części elektrycznych nigdy nie należy czyścić wodą!
- Urządzenie używać wyłącznie w pozycji stojącej i nie patrzeć bezpośrednio na światło UV (ultrafioletowe),
- Podczas zastosowania i używania świetlówek UV przestrzegać wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa,
- W przypadku stosowania niektórych leków, np. antybiotyków lub u osób wrażliwych, może wystąpić podwyższona wrażliwość skóry na światło UV. Zaleca się zatem zasięgnięcie opinii lekarskiej, np. osobom po przebyciu operacji zaćmy. W indywidualnych przypadkach mogą być konieczne okulary ochronne UV.

Uruchomienie urządzeń Derma LiteCheck®

Przed pierwszym użyciem zdjąć folię ochronną z pokrywy szklanej ochraniającej świetlówki UV! Urządzenie ustawić w pozycji pionowej. Otworzyć prawą i lewą klapę. Klapy te są zabezpieczone zatrzaskiem, który je dokładnie domyka. Dolną, czarną klapę otworzyć do przodu w dół.

Znajdujące się w środku pułki z akcesoriów poluzować i odczepić z zapięcia na rzepy i otworzyć je poza urządzeniem. Wyjąć przewód zasilający 230V.

Wtyczkę (230V) włożyć do gniazdka sieci elektrycznej (230V, 50Hz). Następnie włożyć złącze kabla sieciowego do gniazda znajdującego się na pasku po lewej stronie urządzenia.

Po naciśnięciu przełącznika znajdującego się na prawej stronie urządzenia, powinna zaświecić się lamka kontrolna wskazująca o trybie gotowości.

Przeprowadzenie testu fluorescencyjnego

Fluorescencyjny środek testujący można zamówić na stronie internetowej www.derma-litecheck.de lub www.dermalux.de

Wybrać właściwe miejsce szkolenia, aby światło słoneczne nie wpadało wprost do urządzenia, co może to spowodować utratę atrakcyjnego białego fluorescencyjnego efektu testu. Urządzenie ustawiać możliwie na ciemnych powierzchniach stołu. Na kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia włączyć urządzenie, co przyczyni się do optymalnego wykorzystania wydajności lamp UV.

W celu obserwacji rąk w Derma LiteCheck® osoba testowana zajmuje miejsce przed urządzeniem, wkładając w nie dłonie z zachowaniem odpowiedniej odległości (ok. 15 -20 cm) pod lampami UV.

W celu osiągnięcia bardzo wyraźnego efektu należy dłonie bardzo powoli poruszać. Osoba prowadząca szkolenie oraz inne osoby biorące udział w teście mogą jednocześnie przyglądać się z boku jego wynikom. Po zakończeniu testu zaleca się dokładne umycie rąk.

Po zakończeniu szkolenia

Po treningu należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Urządzenie Derma LiteCheck® pozostawić w pozycji stojącej.

Przewód zasilający i pozostałe części włożyć z powrotem do pudełka z akcesoriami, zamknąć i zabezpieczyć z tyłu, zamykając rzepami na spodzie urządzenia.

Następnie czarną dolną klapę podnieść do góry, zamknąć klapy boczne za pomocą przycisków u góry i u dołu. Urządzenie przechowuje się jak każdy inny segregator w szafie na dokumenty.

Konserwacja urządzenia / czyszczenie

Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego!

W wypadku zabrudzenia urządzenia przetrzeć wilgotną ściereczką, ewentualnie do czyszczenia użyć mydła. Szybko usunąć zabrudzenia wewnątrz urządzenia.

Do czyszczenia nie wolno używać żadnych środków czystości zawierających rozpuszczalniki.

Produkty testowe używane podczas szkolenia powinny być nakładane na ręce poza urządzeniem.

Podczas ćwiczeń zabezpieczyć powierzchnie meblowe ew. podłogi przed zabrudzeniem.

Dane techniczne

Zasilanie: 230V, 50 Hz, urządzenie jest zgodne z CE.

Urządzenie wyposażone jest w 2 lampy - typu T5 8W/BLB, które mogą być używane wyłącznie z tym urządzeniem.

Chodzi tu o szklany czarny promiennik z głównym obszarem emisji od 320 nm÷ 400 nm (UV-A), max. 365 nm. RMS. UV-A natężenie oświetlenia (0,5 m) ~ 1,2 W / m².

Gwarancja

6 miesięcy od daty wystawienia faktury/rachunku. . Lampy są wyłączone z gwarancji

Lampy zamienne

Lampy zamienne są dostępne online na www.dermalux-shop.de

Aby wymienić wadliwe lampy, śrubokrętem krzyżakowym odkręcić śruby pokrywy szklanej, zabezpieczającej je, poluzować i dokręcić później ponownie. Lampy poprawnie usadowić w gnieździe.

Serwis

Ingenieurbüro Ott, Wallersheimer Weg 50 – 58, D-56070 Koblenz

Telefon 0049/261/98242 23 Fax 0049/261/9824225

Urządzenia Derma LiteCheck® przyjmowane są do naprawy wyłącznie pod tym adresem.